

# Instrukcja użycia i przechowywania adapterów SPO2

## 1. Opis ogólny

Adaptery SPO2 służą do mocowania lub przytrzymania różnych elementów wyposażenia stosowanego w procesie pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem (SPO2).

Adaptery wykonane są w wersji do jednokrotnego i wielokrotnego użycia.

Dla adapterów jednokrotnego użycia, niniejsza instrukcja ma zastosowanie, za wyjątkiem informacji dotyczących czynności, związanych z powtórным użyciem.

## 2. Charakterystyka

Adaptery obejmują: owijki, opaski i klipsy.

Adaptery, wielkością i kształtem, są dostosowane do części ciała pacjenta, na której mają być użyte.

## 3. Zasady użycia

Dopasować typ i rozmiar adaptera do czujnika SPO2, z którym ma współpracować.

Zamocować adapter.

## 4. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

### Czyszczenie

Zewnętrzną powłokę adaptera należy delikatnie myć przy pomocy miękkiej szmatki zamoczonej w ciepłej wodzie, jeżeli potrzeba z dodatkiem łagodnych środków myjących lub środków dezynfekujących. Do czyszczenia można użyć również 70% alkohol izopropylowy. Przed użyciem adapter powinien wyschnąć.

Do mycia nie należy stosować środków zawierających materiały ściernie, środków żrących, rozpuszczalników ani innych produktów, które mogłyby uszkodzić adapter.

### Dezynfekcja

Materiałami zalecanymi do dezynfekcji adapterów są 70% alkohol izopropylowy lub 70% etanol.

Mogą być również stosowane inne środki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych, jeżeli nie wpływają negatywnie na adapter (przed ich zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia tych środków).

### Steryliczacja

Preferowaną metodą jest sterylizacja za pomocą tlenu etylenu (postępować zgodnie z procedurą dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed użyciem, należy adaptery bezpiecznie i dokładnie wywietrzyć.

Steryliczacja innymi metodami mogłaby trwale uszkodzić adapter.

## 5. Przechowywanie

Adaptery należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do 50°C i względnej wilgotności powietrza od 20% do 80%

## 6. Ostrzeżenia

Adaptery w stanie dostawy nie są poddawane procesowi sterylizacji.

Zamocowania adaptera na ciele pacjenta powinien dokonywać personel posiadający odpowiednią wiedzę.

Utylizacja zużytego adaptera powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

## Instrukcja użycia i przechowywania adapterów SPO2

### 7. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzedaży.

Okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia i przechowywania.

**SORIMEX**



SORIMEX sp. z o.o. sp. k.  
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 657 77 20, fax +48 56 657 77 21  
e-mail: [biuro@sorimex.pl](mailto:biuro@sorimex.pl) [www.sorimex.eu](http://www.sorimex.eu)

**CE**

Data ostatniej weryfikacji  
2011-11-22