

Adapter SpO2



SORIMEX
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ♦ www.sorimex.eu



Data ostatniej weryfikacji
Date of last verification
Letzte Verifikation
Число последней проверки
2016-01-01

1. Opis ogólny

Adaptory SPO2 służą do mocowania lub przytrzymania różnych elementów wyposażenia stosowanego w procesie pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem (SPO2).

Adaptory wykonane są w wersji do jednokrotnego i wielokrotnego użycia.

Dla adapterów jednokrotnego użycia, niniejsza instrukcja ma zastosowanie, za wyjątkiem informacji dotyczących czynności, związanych z powtórным użyciem.

2. Charakterystyka

Adaptory obejmują: owijki, opaski i klipsy.

Adaptory, wielkością i kształtem, są dostosowane do części ciała pacjenta, na której mają być użyte.

3. Zasady użycia

Dopasować typ i rozmiar adaptera do czujnika SPO2, z którym ma współpracować.

Zamocować adapter.

4. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie

Zewnętrzną powłokę adaptera należy delikatnie myć przy pomocy miękkiej szmatki zamoczonej w ciepłej wodzie, jeżeli potrzeba z dodatkiem łagodnych środków myjących lub środków dezynfekujących. Do czyszczenia można użyć również 70% alkohol izopropylowy. Przed użyciem adapter powinien wyschnąć.

Do mycia nie należy stosować środków zawierających materiały ściernie, środków żrących, rozpuszczalników ani innych produktów, które mogłyby uszkodzić adapter.

Dezynfekcja

Materiałami zalecanymi do dezynfekcji adapterów są 70% alkohol izopropylowy lub 70% etanol.

Mogą być również stosowane inne środki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji wyrobów medycznych, jeżeli nie wpływają negatywnie na adapter (przed ich zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia tych środków).

Sterylizacja

Preferowaną metodą jest sterylizacja za pomocą tlenu etylenu (postępować zgodnie z procedurą dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed użyciem, należy adaptory bezpiecznie i dokładnie wywietrzyć.

Sterylizacja innymi metodami mogłaby trwale uszkodzić adapter.

5. Przechowywanie

Adaptory należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do 50°C i względnej wilgotności powietrza od 20% do 80%

6. Ostrzeżenia

Adaptory w stanie dostawy nie są poddawane procesowi sterylizacji.

Zamocowania adaptera na ciele pacjenta powinien dokonywać personel posiadający odpowiednią wiedzę.

Utylizacja zużytego adaptera powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

7. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia i przechowywania.

Symbole / Symbols / Symbole / Символы



Numer katalogowy
Catalogue number
Katalognummer
Каталожный номер



Numer partii
Batch code
Lotnummer
Номер партии



Ostrzeżenie
Caution
Warnung
Предостережение



Wytwórca
Manufacturer
Hersteller
Производитель



Data produkcji - włączona w numer partii, stanowi cyfry od 2 do 7 numeru LOT
Date of manufacture - included in the bath code, these are numbers from 2 to 7 LOT number
Herstellungsdatum - in der Lotnummer enthalten, die Zahlen 2-7 Lotnummer
Число производства - включены в номер партии, число от 2 до 7 Номер LOT



Nie używać jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
Do not use if the package is damaged
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Не использовать если упаковка стала повреждённой



Ograniczenia temperatury
Temperature limit
Temperaturbeschränkungen
Ограничения температуры



Zapoznać się z instrukcją używania
Consult instructions for use
Sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen
Ознакомиться с инструкцией обслуживания



Chronić przed światłem słonecznym
Keep away from sunlight
Vor Sonnenstrahlen schützen
Предохранять от солнечного света



Chronić przed wilgocią
Keep dry
Vor Feuchtigkeit schützen
Предохранять от сырости