

# SORIMEX



Rękawice jednorazowe nitrylowe

**PREMIUM**



SORIMEX

ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland

tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21

e-mail: [biuro@sorimex.pl](mailto:biuro@sorimex.pl) ♦ [www.sorimex.eu](http://www.sorimex.eu)



Data ostatniej weryfikacji  
2021-01-05

# Instrukcja używania i przechowywania jednorazowych rękawic nitylowych Oh my Glove Premium

## 1. Opis ogólny

Oh my Glove Premium to medyczne, nitylowe, bezpudrowe, niesterylne rękawice ochronne przeznaczone do jednorazowego użytku. Rękawice nie zawierają lateksu.

Produkt przeznaczony do ochrony dłoni przed kontaktem z brudnymi lub skażonymi powierzchniami. Rękawice dedykowane są również do używania w kontakcie z żywnością.

Rękawice zostały wytworzone zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG i są wyrobem medycznym klasy I. Jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I są zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425.

## 2. Charakterystyka produktu

- surowiec: kauczuk nitylowy (NBR)
- rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- kolor: niebieski
- ilość w opakowaniu: 10 sztuk
- wykończenie mankietu: rolowany
- powierzchnia: chlorowana, teksturowane końce palców
- kształt: uniwersalny, pasujący na obie dłonie
- AQL: 1.5

Okres ważności produktu wynosi 5 lat od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu rękawic).


## 3. Przechowywanie

Rękawice przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które dzięki klapce z klejem można wielokrotnie otwierać i zamykać. Składować w suchym miejscu i temperaturze od 10°C do 30°C. Wyrób chronić przed bezpośrednim działaniem: promieni słonecznych, kurzu i ozonu.

## 4. Sposób użycia

Przed założeniem rękawic należy upewnić się, że dłonie są czyste i suche. Zdecydowanym ruchem unieść klapkę z tyłu opakowania, by je otworzyć. Wyjąć rękawice z opakowania i założyć na dłonie. Po użyciu złapać palcami za rękawicę na wysokości nadgarstka i zdjąć, rolując mankiet, unikając kontaktu dłoni z zewnętrzną stroną rękawicy. Zużyte rękawice wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

### Kontakt z żywnością

Rękawice posiadają oznaczenie  wskazujące na przeznaczenie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 10/2011 oraz normy EN 1186.

## 5. Ostrzeżenia

Przed użyciem sprawdzić rękawice wizualnie pod kątem ewentualnych wad (np. dziury, zabrudzenia). Nie zakładać rękawic uszkodzonych.

Składniki użyte do produkcji rękawic nitylowych mogą powodować reakcje alergiczne u osób o szczególnie wrażliwej skórze. W przypadku ich wystąpienia przerwać używanie i skontaktować się z lekarzem.

Rękawice nie są przewidziane do stosowania jako bariera do wszystkich związków chemicznych i biologicznych. Mogą być jednak przeznaczone do kontaktu z łagodnymi substancjami chemicznymi.

Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz jako środka ochrony przed ostrymi przedmiotami. Nie stanowią one także bariery w kontakcie z gorącymi lub zimnymi przedmiotami.

Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nie są zabawką i powinny być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej.

Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami.

## Symbole



Numer katalogowy



Numer partii



Data ważności



Nie używać ponownie



Wytwórca



Wyrób nie zawiera lateksu gumy naturalnej



Ograniczenia temperatury



Ostrzeżenie



Zapoznać się z instrukcją używania



Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością



Chronić przed światłem słonecznym



Chronić przed wilgocią



Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia