

SORIMEX

Kable czujników temperatury



SORIMEX
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ♦ www.sorimex.eu



Data ostatniej weryfikacji
Date of last verification
Letzte Verifikation
Число последней проверки
2016-01-01

1. Przeznaczenie

Kabel czujnika temperatury jest przeznaczony do elektrycznego połączenia czujnika temperatury z aparatem. Kabel czujnika temperatury zakwalifikowany jest do klasy I i dostarczany jako niejałowy.

2. Charakterystyka

Kabel składa się z wtyku i gniazda odpowiednio dostosowanych do aparatu i czujnika, oraz odpowiedniej długości wielożyłowego kabla.

Konkretna konstrukcja dostosowana jest do aparatu, z którym kabel ma współpracować.

Kabel może stykać się z nieuszkodzoną skórą.

3. Zasady użycia

Podczas używania należy przestrzegać następujących zasad:

- upewnić się, czy kabel jest przeznaczony do współpracy z danym aparatem,
- kabla nie należy nadmiernie zginać (promień zgięcia nie powinien być mniejszy niż 60 mm),
- nie należy ciągnąć za kabel,
- kabel należy układać tak, aby nie istniało niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia np. przez nadeptanie, przejechanie, położenie na nim ciężkiego przedmiotu itp.,
- łączenie i rozłączanie kabla wykonywać trzymając za osłonę przyłączy (gniazdo, wtyk),
- należy chronić przyłącza kabla przed zalaniem.

4. Instalacja

Podłączyć kabel z jednej strony do aparatu, a z drugiej strony do czujnika temperatury. Włączyć aparat i sprawdzić prawidłowość działania zgodnie z instrukcją obsługi aparatu.

Zwrócić uwagę na właściwy dobór kabla do odpowiedniego aparatu.

5. Zalecane czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Czyszczenie

Obmyć kabel ciepłą wodą z mydłem, delikatnie czyścić przy pomocy miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem lub 70% alkoholem izopropylowym. Kabel powinien wyschnąć przed użyciem.

Nie stosować środków żrących lub produktów chemicznych.

Podczas czyszczenia nie moczyć, ani nie zanurzać kabla, nie używać nadmiernej siły, która może przerwać wewnętrzne połączenia przewodów.

Ciągłe zginanie kabla w czasie używania i czyszczenia może przerwać przewody wewnętrzne. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Unikać kontaktu z silnymi rozpuszczalnikami: aromatycznymi, chlorowanymi, ketonowymi, eterowymi lub estrowymi. Nie dopuścić, aby środki czyszczące miały kontakt z wtykami znajdującymi się na obu zakończeniach kabla.

Dezynfekcja

Kabel należy dezynfekować przez umycie 70% alkoholem izopropylowym. Nie dopuścić, aby alkohol miał kontakt z wtykami znajdującymi się na obu zakończeniach kabla.

Sterylizacja

Zalecaną metodą jest sterylizacja za pomocą tlenu etylenu (postępować zgodnie z procedurą dostawcy sterylizatora gazowego). Po sterylizacji, przed użyciem, kabel należy bezpiecznie i dokładnie wywietrzyć. Sterylizacja innymi metodami mogłaby trwale uszkodzić kabel.

6. Przechowywanie

Kabel należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -25°C do +55°C


Kabel będący w użyciu należy przechowywać w suchym miejscu.

Po użyciu kabel luźno zwinąć, bez ostrych przegięć.

7. Ostrzeżenia

Nie przestrzeganie zasad użycia może spowodować powstanie przerwy w torze przesyłowym w kablu. Objawy te są łatwe do zidentyfikowania przez obsługę aparatu.

Uszkodzony kabel należy zastąpić sprawnym.

Utylizacja zużyte  abla powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

8. Gwarancja

Okres gwarancji obejmuje 1 rok od daty sprzedaży.

Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia i przechowywania.

Symbole / Symbols / Symbole / Символы



Numer katalogowy
Catalogue number
Katalognummer
Каталожный номер



Numer partii
Batch code
Lotnummer
Номер партии



Ostrzeżenie
Caution
Warnung
Предостережение



Wytwórca
Manufacturer
Hersteller
Производитель



Data produkcji - włączona w numer partii, stanowi cyfry od 2 do 7 numeru LOT
Date of manufacture - included in the bath code, these are numbers from 2 to 7 LOT number
Herstellungsdatum - in der Lotnummer enthalten, die Zahlen 2-7 Lotnummer
Число производства - включены в номер партии, число от 2 до 7 Номер LOT



Nie używać jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
Do not use if the package is damaged
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Не использовать если упаковка стала повреждённой



Ograniczenia temperatury
Temperature limit
Temperaturbeschränkungen
Ограничения температуры



Zapoznać się z instrukcją używania
Consult instructions for use
Sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen
Ознакомиться с инструкцией обслуживания



Oznakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zgodne z normą EN 50419
Marking of electric and electronic devices, consistent with the EN 50419 norm
Bezeichnung der elektrischen und elektronischen Geräte gemäß der Norm EN 50419



Маркирование электрических и электронных изделий соответствующее норме EN 50419



Chronić przed światłem słonecznym
Keep away from sunlight
Vor Sonnenstrahlen schützen
Предохранять от солнечного света



Chronić przed wilgocią
Keep dry
Vor Feuchtigkeit schützen
Предохранять от сырости